

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **P-2800**
Bezeichnung **SolidSafety**
FFP2-Maske
Filtrierende Halbmaske (FFP2 NR D)



MAßE	
Länge	Breite
200 mm	87 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material	☒ PP-Vlies	☐ Papier					
Farbe	☐ Blau [B]	☐ Berry [Berry]	☐ Bordeaux [BR]	☐ Cedro [C]	☐ Grün [G]	☐ Lagoon [Lagoon]	☐ Lila [L]
	☐ Lime [Lime]	☐ Mix [Mix] grün, blau, pink, gelb, orange	☐ Orange [O]	☐ Pink [P]	☒ Weiß [W]	☐ Gelb [Y]	☐ Platinum/Grau [PT]
	☐ Blau gemustert [DB]	☐ Weinrot gemustert [WR]	☐ Schwarz [SCH]	☐ Schwarz-Rot-Gold	☐ Ozeangrün [CO]		
Eigenschaften	☒ FFP2	☐ 3 Lagen	☒ latexfrei	☒ ohne Ventil	☒ konisch geformt	☒ mit Kopfband	☐ mit Aktivkohlefilter
Bemerkung	Schutz vor festen und flüssigen, gesundheitsschädlichen Stäuben, Rauch und Aerosolen. Filterung von Krankheitserregern wie Viren, Bakterien und Pilzsporen. Die Filterleistung beträgt 94% der in der Luft befindlichen Partikel mit einer Größe von bis zu 0,6 µm. Einsetzbar bis zum 10fachen des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW)						

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	☐ Kategorie I	☐ Kategorie II	☒ Kategorie III	☐ kein PSA-Artikel			CE
MP-Verordnung (EU) 2017/745	☐ Klasse I	☐ Klasse II	☐ Klasse III	☐ steril	☐ mit Messfunktion	☒ kein Medizin-Produkt	

geprüft nach	☐ EN 14683:2025	☒ EN 149:2001					
--------------	--	---	--	--	--	--	--

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **P-2800**
Bezeichnung **SolidSafety**
FFP2-Maske
Filtrierende Halbmaske (FFP2 NR D)



LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG	
Allgemeines	
Material	Karton
Stück pro Unterverpackung	20
GTIN Unterverpackung Blau [B]	-
GTIN Unterverpackung Berry [Berry]	-
GTIN Unterverpackung Bordeaux [BR]	-
GTIN Unterverpackung Cedro [C]	-
GTIN Unterverpackung Grün [G]	-
GTIN Unterverpackung Lagoon [Lagoon]	-
GTIN Unterverpackung Lila [L]	-
GTIN Unterverpackung Lime [Lime]	-
GTIN Unterverpackung Mix [Mix]	-
GTIN Unterverpackung Orange [O]	-
GTIN Unterverpackung Pink [P]	-
GTIN Unterverpackung Weiß [W]	4044941030685
GTIN Unterverpackung Gelb [Y]	-
GTIN Unterverpackung Platinum [PT]	-
GTIN Unterverpackung blau gem. [DB]	-
GTIN Unterverpackung weinrot gem. [WR]	-
GTIN Unterverpackung Schwarz [SCH]	-
GTIN Unterverpackung Schwarz-Rot-Gold	-
GTIN Unterverpackung Clean Ocean [CO]	-
Maße & Größe	
Länge	220 mm
Breite	100 mm
Höhe	220 mm
Gewichte	
Größe	Bruttogewicht*
uni	406 g

LOGISTISCHE DATEN PALETTE	
Allgemeines	
Palettenart	Europalette
Maße & Größe	
Kartons pro Lage	5
Lagen pro Palette	4
Palettenhöhe	199 cm
Gewichte	
Größe	Bruttogewicht*
uni	132 kg

LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG	
Allgemeines	
Material	Karton
Unterverpackungen je Umverpackung	12
GTIN Umverpackung Blau [B]	-
GTIN Umverpackung Berry [Berry]	-
GTIN Umverpackung Bordeaux [BR]	-
GTIN Umverpackung Cedro [C]	-
GTIN Umverpackung Grün [G]	-
GTIN Umverpackung Lagoon [Lagoon]	-
GTIN Umverpackung Lila [L]	-
GTIN Umverpackung Lime [Lime]	-
GTIN Umverpackung Mix [Mix]	-
GTIN Umverpackung Orange [O]	-
GTIN Umverpackung Pink [P]	-
GTIN Umverpackung Weiß [W]	4044941030692
GTIN Umverpackung Gelb [Y]	-
GTIN Umverpackung Platinum [PT]	-
GTIN Umverpackung blau gem. [DB]	-
GTIN Umverpackung weinrot gem. [WR]	-
GTIN Umverpackung Schwarz [SCH]	-
GTIN Umverpackung Schwarz-Rot-Gold	-
GTIN Umverpackung Clean Ocean [CO]	-
Maße & Größe	
Länge	460 mm
Breite	320 mm
Höhe	460 mm
Gewichte	
Größe	Bruttogewicht*
uni	5.372 g

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **P-2800**Bezeichnung **SolidSafety****FFP2-Maske****Filtrierende Halbmaske (FFP2 NR
D)**

WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lagerung/ Verfallzeit	Mundschutz in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (Laserdrucker, -kopierer) lagern. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen. Das Verfallsdatum – gültig bei ordnungsgemäßer Lagerung – befindet sich auf der Verpackung.
Nutzung und Überprüfung	Mundschutz immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass die Mundschutz für die vorgesehene Verwendung geeignet sind. Wechseln Sie die Maske, wenn sie durchfeuchtet ist. Nach dem Abnehmen der Maske die Hände desinfizieren.
Entsorgung	Gebrauchter Mundschutz ist entsprechend der Entsorgungsvorschriften des örtlichen Entsorgers zu entsorgen. Unbenutzter Mundschutz kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Warnhinweise	Wechseln Sie die Maske, wenn sie durchfeuchtet ist. Artikel ist leicht entflammbar - von Hitze und/oder Feuer fernhalten.
An- und Ausziehanleitung	ANZIEHEN: Maske über Mund und Nase im Gesicht platzieren und mit Bändern bzw. Ohrschlaufen im Gesicht fixieren. Den flexiblen Nasenbügel so an die Gesichtsform anpassen, dass möglichst wenig Luft am oberen Ende entweichen kann. AUSZIEHEN: Bänder lösen und somit den Mundschutz vom Gesicht entfernen. Nicht das Vliesmaterial berühren. Nach dem Entsorgen des Mundschutzes Hände desinfizieren.

* geringe Abweichungen aufgrund von Standard-Toleranzen möglich

Rev.-Nr.: 2026-02

Datum 22. 09.2026

Änderungen & Irrtümer vorbehalten