

## Fiche Technique

N° d'article **AL-001**

Description: **ALPHA EXTREME GRIP**

Gants en nitrile

orange, non stérile, non poudré



| ÉPAISSEUR |         |                 |
|-----------|---------|-----------------|
| manchette | paum    | bout des doigts |
| 0,12 mm   | 0,18 mm | 0,22 mm         |

| DESCRIPTION DU PRODUIT |                                                    |                                                  |                                           |                                                 |                                                |                                           |                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| matériel               | <input type="checkbox"/> Latex                     | <input checked="" type="checkbox"/> Nitrile      | <input type="checkbox"/> Vinyle           | <input type="checkbox"/> Vinyle-Nitrile-mix     | <input type="checkbox"/> Polyéthylène (PE)     | <input type="checkbox"/> TPE              | <input type="checkbox"/> coton             |
| couleur                | <input type="checkbox"/> blanc                     | <input type="checkbox"/> bleu                    | <input type="checkbox"/> noir             | <input type="checkbox"/> menthe                 | <input type="checkbox"/> pourpre               | <input type="checkbox"/> mélanger         | <input checked="" type="checkbox"/> orange |
| caractéristiques       | <input type="checkbox"/> pré-poudré                | <input checked="" type="checkbox"/> non poudré   | <input type="checkbox"/> stérile          | <input checked="" type="checkbox"/> non stérile | <input checked="" type="checkbox"/> ambidextre | <input type="checkbox"/> forme anatomique | <input type="checkbox"/> biodégradable     |
| surface                | <input checked="" type="checkbox"/> microtexturada | <input type="checkbox"/> bout des doigts rugueux | <input type="checkbox"/> sans texturation | <input type="checkbox"/> martelé                | <input type="checkbox"/> intérieur chloré      |                                           |                                            |

| DIMENSIONS |          |             |             |             |             |             |              |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|            | XS (5-6) | S (6-7)     | M (7-8)     | L (8-9)     | XL (9-10)   | XXL (10-11) | XXXL (11-12) |
| largeur    | -        | 80 ± 10 mm  | 95 ± 10 mm  | 110 ± 10 mm | 115 ± 10 mm | 125 ± 10 mm | -            |
| longueur   | -        | 300 ± 10 mm | 300 ± 10 mm | 300 ± 10 mm | 300 ± 10 mm | 300 ± 10 mm | -            |

| EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES           |                                                     |                                                     |                                                   |                                                         |                                                   |                                                               |    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|
| Règlement EPI (EU) 2016/425        | <input type="checkbox"/> catégorie I                | <input type="checkbox"/> catégorie II               | <input checked="" type="checkbox"/> catégorie III | <input type="checkbox"/> pas d'article EPI              |                                                   |                                                               | CE |
| Règlement DM (EU) 2017/745         | <input type="checkbox"/> classe I                   | <input type="checkbox"/> classe II a                | <input type="checkbox"/> classe III               | <input type="checkbox"/> stérile                        | <input type="checkbox"/> avec fonction de mesure  | <input checked="" type="checkbox"/> pas de dispositif médical |    |
| Contact alimentaire (CE) 1935/2004 | <input checked="" type="checkbox"/> aliments acides | <input checked="" type="checkbox"/> aliments aqueux | <input checked="" type="checkbox"/> aliments gras | <input checked="" type="checkbox"/> aliments alcoolisés | <input checked="" type="checkbox"/> aliments secs | <input type="checkbox"/> Aucun contact avec les aliments      |    |

| STANDARDISATION                      |                                                                                                         |                               |                           |                                    |                             |                             |                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| EN 388 risques mécaniques            | résistance à l'abrasion                                                                                 | résistance aux coupures Coupe | résistance au déchirement | force de pénétration de l'aiguille | résistance aux coupures TDM | protection contre les chocs |                                                 |
| niveau                               | non applicable                                                                                          |                               |                           |                                    |                             |                             |                                                 |
| EN 374-1 risques chimiques           | produit chimique                                                                                        |                               | lettre d'identification   | niveau                             | temps de perméation         | dégradation                 | ISO 374-1/Type B<br><br>JKOPT<br>ISO 374-5:2016 |
| EN 374-4 dégradation                 | n-Heptane                                                                                               |                               | J                         | 2                                  | > 30 min                    | 36,4 %                      |                                                 |
|                                      | Sodium hydroxide 40%                                                                                    |                               | K                         | 6                                  | > 480 min                   | -32,6 %                     |                                                 |
|                                      | Ammonium Hydroxide 25%                                                                                  |                               | O                         | 2                                  | > 30 min                    | -4,1 %                      |                                                 |
|                                      | Hydrogen Peroxide 30%                                                                                   |                               | P                         | 3                                  | > 60 min                    |                             |                                                 |
|                                      | Formaldéhyde 37%                                                                                        |                               | T                         | 6                                  | > 480 min                   |                             |                                                 |
| EN 374-5 microorganismes             | Le gant est étanche contre les microorganismes (bactéries et champignons). Non vérifié contre les virus |                               |                           |                                    |                             |                             |                                                 |
| EN ISO 21420 gants de protection     | Les gants répondent aux exigences selon EN ISO 21420                                                    |                               |                           |                                    |                             |                             |                                                 |
| EN 455 gants médicaux jetables       | non applicable                                                                                          |                               |                           |                                    |                             |                             |                                                 |
| EN 455-1 imperméabilité (sans trous) | non applicable                                                                                          |                               |                           |                                    |                             |                             |                                                 |
| EN 16350 propriétés électrostatiques | non applicable                                                                                          |                               |                           |                                    |                             |                             |                                                 |

## Fiche Technique

N° d'article **AL-001**  
Description: **ALPHA EXTREME GRIP**  
**Gants en nitrile**  
**orange, non stérile, non poudré**



DONNÉES LOGISTIQUES SOUS-EMBALLAGES

données générales

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| matériel                        | carton        |
| pièces par sous-emballage       | 50            |
| GTIN sous-emballage taille XS   | -             |
| GTIN sous-emballage taille S    | 4044941739786 |
| GTIN sous-emballage taille M    | 4044941739809 |
| GTIN sous-emballage taille L    | 4044941739823 |
| GTIN sous-emballage taille XL   | 4044941739847 |
| GTIN sous-emballage taille XXL  | 4044941739861 |
| GTIN sous-emballage taille XXXL | -             |
| PZN sous-emballage taille XS    | -             |
| PZN sous-emballage taille S     | -             |
| PZN sous-emballage taille M     | -             |
| PZN sous-emballage taille L     | -             |
| PZN sous-emballage taille XL    | -             |
| PZN sous-emballage taille XXL   | -             |
| PZN sous-emballage taille XXXL  | -             |

dimensions et taille

|         |        |
|---------|--------|
| longeur | 240 mm |
| largeur | 125 mm |
| hauteur | 65 mm  |

poids

| taille | poids net | poids brut |
|--------|-----------|------------|
| XS     | -         | -          |
| S      | 400 g     | 460 g      |
| M      | 425 g     | 485 g      |
| L      | 450 g     | 510 g      |
| XL     | 475 g     | 535 g      |
| XXL    | 500 g     | 560 g      |
| XXXL   | -         | -          |

| DONNÉES LOGISTIQUES PALETTE |           |             |
|-----------------------------|-----------|-------------|
| données générales           |           |             |
| type de la palette          |           | europalette |
| dimensions et taille        |           |             |
| carton par emplacement      |           | 9           |
| emplacement par palette     |           | 7           |
| hauteur de la palette       |           | 190 cm      |
| poids                       |           |             |
| taille                      | poids net | poids brut  |
| XS                          | -         | -           |
| S                           | 321 kg    | 346 kg      |
| M                           | 337 kg    | 362 kg      |
| L                           | 353 kg    | 378 kg      |
| XL                          | 369 kg    | 394 kg      |
| XXL                         | 384 kg    | 409 kg      |
| XXXL                        | -         | -           |

| DONNÉES LOGISTIQUES EMBALLAGE EXTÉRIEUR |               |            |
|-----------------------------------------|---------------|------------|
| données générales                       |               |            |
| matériel                                | carton        |            |
| sous-emballage par emballage extérieur  | 10            |            |
| GTIN emballage extérieur taille XS      | -             |            |
| GTIN emballage extérieur taille S       | 4044941739793 |            |
| GTIN emballage extérieur taille M       | 4044941739816 |            |
| GTIN emballage extérieur taille L       | 4044941739830 |            |
| GTIN emballage extérieur taille XL      | 4044941739854 |            |
| GTIN emballage extérieur taille XXL     | 4044941739878 |            |
| GTIN emballage extérieur taille XXXL    | -             |            |
| PZN emballage extérieur taille XS       | -             |            |
| PZN emballage extérieur taille S        | -             |            |
| PZN emballage extérieur taille M        | -             |            |
| PZN emballage extérieur taille L        | -             |            |
| PZN emballage extérieur taille XL       | -             |            |
| PZN emballage extérieur taille XXL      | -             |            |
| PZN emballage extérieur taille XXXL     | -             |            |
| dimensions et taille                    |               |            |
| longueur                                | 335 mm        |            |
| largeur                                 | 258 mm        |            |
| hauteur                                 | 250 mm        |            |
| poids                                   |               |            |
| taille                                  | poids net     | poids brut |
| XS                                      | -             | -          |
| S                                       | 4.600 g       | 5.100 g    |
| M                                       | 4.850 g       | 5.350 g    |
| L                                       | 5.100 g       | 5.600 g    |
| XL                                      | 5.350 g       | 5.850 g    |
| XXL                                     | 5.600 g       | 6.100 g    |
| XXXL                                    | -             | -          |

## Fiche Technique

N° d'article **AL-001**

Description: **ALPHA EXTREME GRIP**  
**Gants en nitrile**  
**orange, non stérile, non poudré**



### AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stockage/délai de péremption</b>                               | Conserver les gants dans leur emballage d'origine, dans un endroit frais et sec, sans charge supplémentaire, à l'abri de la lumière directe du soleil. Ne pas stocker à proximité de sources d'ozone (imprimantes et photocopieurs laser). La durée de péremption effective en cours d'utilisation ne peut pas être indiquée de manière générale, car elle dépend des conditions générales lors de l'utilisation. Il convient dans tous les cas de procéder à une évaluation individuelle des risques au cas par cas. La date de péremption - valable si le produit est stocké correctement - est indiquée sur l'emballage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Utilisation et examen</b>                                      | Toujours utiliser les gants de protection uniquement pour le domaine d'application prévu et dans la taille appropriée. Il convient de procéder à un contrôle/une évaluation des risques afin de s'assurer que les gants conviennent à l'utilisation prévue, car les conditions sur le lieu de travail peuvent différer de celles des essais de type en fonction de la température, de l'abrasion et de la dégradation. Les temps de rupture et les niveaux de perméation indiqués sont basés sur des mesures en laboratoire et sont déterminés à partir d'échantillons prélevés dans la paume de la main. La durée de protection effective d'un gant pour une substance donnée peut varier de manière significative en fonction des conditions d'utilisation (température, abrasion, étirement). Dans le cas de produits chimiques agressifs, la dégradation (modification des propriétés mécaniques) peut être un facteur important à prendre en compte lors du choix de gants résistants aux produits chimiques. Ces données ne reflètent pas la durée réelle de protection sur le lieu de travail ni la distinction entre les mélanges et les produits chimiques purs. La résistance aux produits chimiques a été déterminée dans des conditions de laboratoire uniquement à partir d'échantillons prélevés dans la paume de la main et ne concerne que les produits chimiques testés. Il peut en être autrement si le produit chimique est utilisé dans un mélange. La résistance à la pénétration a été évaluée dans des conditions de laboratoire et ne concerne que l'échantillon testé. Les résultats de dégradation selon la norme EN ISO 374-4 indiquent la variation de la résistance à la perforation des gants après exposition au produit chimique testé.<br>Avant utilisation, vérifier que les gants ne sont pas troués ou endommagés. |
| <b>Élimination</b>                                                | Les gants usagés doivent être éliminés conformément aux prescriptions d'élimination des déchets de l'entreprise locale. Les gants non utilisés peuvent être jetés avec les ordures ménagères.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Désinfection</b>                                               | La désinfection n'est pas prévue pour ces gants et relève de la responsabilité individuelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Avertissements/ Indications pour les personnes allergiques</b> | Les gants de protection sont destinés à un usage unique.<br>Ce produit contient des dithiocarbamates qui peuvent provoquer des réactions allergiques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Instructions de mise en place et d'extraction</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |