

Gut geschützt.

AMPri

Es kann so einfach sein!



Artikelnr. 02990

1 Stk. verpackt im Polybeutel, 30 Polybeutel im Karton

Artikelnr. 02991

5 Stk. verpackt im Polybeutel, 20 Polybeutel im Karton



Wie nutze ich den Schutzschild?

1. Entfernen Sie beidseitig die Schutzfolien vom Visier des Gesichtsschildes.
2. Führen Sie das Schutzvisier in die Halterung ein, indem Sie die drei Aussparungen in die Zapfen der Halterung einklicken.
3. Das elastische Band kann individuell an die Kopfform des Anwenders angepasst werden. Befestigen Sie das Elastikband nach Bedarf (Kopfumfang) am Abschlusshaken des Rahmens.

Der **SolidSafety Vollgesichts-Schutzschild** deckt die Mund-, Nasen- und Augenbereiche ab. Der Schutzschild eignet sich perfekt als **Spritzschutz** für Anwender mit direktem Kundenkontakt, die nicht durch feste Plexiglaswände geschützt werden können. Dazu zählen unter anderem Zahnärzte und Mitarbeiter aus dem Dentalbereich, Friseure, Kosmetiker, medizinisches Personal, Pflegekräfte etc.

Der im Polybeutel hygienisch verpackte Gesichtsschutzschild besteht aus dem blauen Rahmen aus spritzgegossenem Polypropylen (PP), einem auswechselbaren transparenten Visier aus PETG und einem schwarzen Elastikband. Der Rahmen ist autoklavierbar bei bis zu 134° C, das Visier kann mit handelsüblichen Oberflächendesinfektionsmitteln desinfiziert werden. Das Produkt ist persönliche Schutzausrüstung (PSA) Kategorie I gemäß Verordnung (EU) 2016/425. Der Schutzschild bietet Schutz gegen minimale Risiken/Spritzwasserschutz.

AMPri

AMPri Handelsgesellschaft mbH · Benzstraße 16 · 21423 Winsen/Luhe
Tel.: +49 (0)4171 8480-0 · Fax: +49 (0)4171 8480-190 · E-Mail: info@ampri.de

www.ampri.de