



Quick Des N / Quick Des N Lemon

Alkoholische Schnelldesinfektion

- Ideal für die sichere Desinfektion in der Routine
- Umfassende, schnelle Wirksamkeit
- Sehr gute Materialverträglichkeit

Vor Gebrauch Etikett lesen.

Präparatetyp

Quick DES N Lemon ist ein gebrauchsfertiges, alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel auf Basis von Ethanol zur materialschonenden Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art. Das Produkt ist insbesondere ideal geeignet für Bereiche im patientennahen Umfeld, in denen ein umfassendes Wirkungsspektrum erforderlich ist. Neben einer wirksamen Desinfektion innerhalb kürzester Zeit, weist das Produkt eine sehr gute Materialverträglichkeit auf und hinterlässt keine Streifen und Rückstände.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 45 g Ethanol.

Chemisch-physikalische Daten

Aussehene des Konzentrates: klare, farblose Lösung
 pH-Wert: 5,5 - 6,5
 Flammpunkt: 24°C

Anwendungsgebiete

Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR):
 Schnelldesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art, vorwiegend in patientennaher Umgebung.

Gemäß EU-Medizinproduktverordnung:
 Schnelldesinfektion und Reinigung von nicht invasiven Medizinprodukten, insbesondere auch für empfindliche Flächen von Medizinprodukten.

Anwendung

Zur vollständigen Benetzung die unverdünnte Lösung gleichmäßig auf alkoholbeständige Flächen aufbringen und über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten. Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

Anwendungshinweise

Quick DES N Lemon kann als Wischdesinfektion oder Sprühapplikation verwendet werden.



VAH gelistet

Einwirkzeiten

Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion:

bakterizid, levurozid:	2 min
tuberkulozid:	30 s
mykobakterizid:	1 min
begrenzt viruzid:	1 min
begrenzt viruzid PLUS:	3 min

Lieferformen

Einzelpackung	Verkaufseinheit	Ref.-No.
Duftneutral		
1 Liter Flasche	1 x 1 L	09920-N
5 Liter Flasche	1 x 5 L	09921-N
10 Liter Kanister	1 x 10 L	09922-N
Lemon		
10 Liter Kanister	1 x 10 L	09925-N

Quick Des N: baua: Reg.-Nr. N-97772
Quick Des N Lemon: baua: Reg.-Nr. N-97774

Gutachten

Unsere Produkte sind vollumpfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:



Achtung

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dampf/Aerosol nicht einatmen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Fachkunde gem. nationaler Richtlinien.

AMPri

AMPri Handelsgesellschaft mbH

Benzstr. 16 • 21423 Winsen (Luhe) • Germany

Tel. +49 (0)4171- 8480-0 • www.ampri.de • info@ampri.de



bioSight GmbH

Brasselsbergstr. 3 • 34132 Kassel • Tel.: +49 (0)561 81678111