

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **01196**

Bezeichnung **MED-COMFORT HIGH RISK**
Nitril-Untersuchungshandschuh
blau, nicht steril, puderfrei



SCHICHTSTÄRKEN*		
Stulpe	Handfläche	Fingerspitzen
0,15 mm	0,21 mm	0,25 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material	☐ Latex	☒ Nitril	☐ Vinyl	☐ Vinyl-Nitril-Gemisch	☐ Polyethylen (PE)	☐ TPE	☐ Baumwolle
Farbe	☐ weiß	☒ blau	☐ schwarz	☐ mint	☐ lila	☐ mix	☐ transparent
Eigenschaft	☐ gepudert	☒ puderfrei	☐ steril	☒ nicht steril	☒ Passform beidhändig	☐ passt hand-spezifisch	☒ innen chloriert
Oberfläche	☒ texturiert	☐ keine Texturierung	☐ gehämmert				

GRÖßEN							
	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL (10-11)	XXXL (11-12)
Breite	-	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	115 ± 10 mm	125 ± 10 mm	135 ± 10 mm
Länge	-	300 ± 10 mm	300 ± 10 mm	300 ± 10 mm	300 ± 10 mm	300 ± 10 mm	300 ± 10 mm

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	☐ Kategorie I	☐ Kategorie II	☒ Kategorie III	☐ kein PSA-Artikel			CE
MP-Verordnung (EU) 2017/745	☒ Klasse I	☐ Klasse IIa	☐ Klasse III	☐ steril	☐ mit Messfunktion	☐ kein Medizin-Produkt	
Lebensmittel-Kontakt (EG) 1935/2004	☒ saure Lebensmittel	☒ wässrige Lebensmittel	☒ fette Lebensmittel	☒ alkohol. Lebensmittel	☒ trockene Lebensmittel	☐ kein Lebensmittel-Kontakt	

NORMUNG							
EN 388:2016 mechan. Risiken	Abriebfestigkeit	Schnittfestigkeit Coupe-Test	Weitereißkraft	Durchstichkraft	Schnittfestigkeit TDM-Test	Stoßschutz	
Level	nicht anwendbar						

EN 374-1 Chem. Risiken	Chemikalie	Kennbuchstabe	ISO 374-1/Typ A  JKOPST
	n-Heptan	J	
	Natriumhydroxid 40%	K	
	Ammoniakwasser 25%	O	
	Wasserstoffperoxid 30%	P	
	Flusssäure 40%	S	
	Formaldehyd 37%	T	
EN 374-5 Mikroorganismen	Der Handschuh ist dicht gegenüber Mikroorganismen (Viren, Bakterien und Pilzen). Prüfung gem. ISO 16604 - Verfahren B		EN ISO 374-5:2016  VIRUS

EN ISO 21420 Schutzhandschuhe	Der Handschuh erfüllt die allgemeinen Anforderungen gem. EN ISO 21420				
-------------------------------	---	--	--	--	--

EN 455 med. Einweghandschuhe	Der Handschuh erfüllt die Anforderungen gem. EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4. Reißkraft ≥ 6 N				EN 455
EN 455-1 Dichtigkeit	Der Handschuh weist bei der Wasserhalteprüfung zur Feststellung von Undichtigkeiten einen AQL < 0,65 auf. (Stichprobenprüfung gem. ISO 2859-1, allg. Prüfniveau I)				AQL 0.65

EN 16350 elektrost. Eigenschaften	nicht anwendbar				
-----------------------------------	-----------------	--	--	--	--

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: 01196

Bezeichnung **MED-COMFORT HIGH RISK**
Nitril-Untersuchungshandschuh
blau, nicht steril, puderfrei



LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG	
Allgemeines	
Material	Karton
Stück pro Unterpackung	50
GTIN Unterpackung Gr. XS	-
GTIN Unterpackung Gr. S	4044941737348
GTIN Unterpackung Gr. M	4044941737362
GTIN Unterpackung Gr. L	4044941737386
GTIN Unterpackung Gr. XL	4044941737416
GTIN Unterpackung Gr. XXL	4044941737430
GTIN Unterpackung Gr. XXXL	4044941736662
PZN Unterpackung Gr. XS	-
PZN Unterpackung Gr. S	-
PZN Unterpackung Gr. M	-
PZN Unterpackung Gr. L	-
PZN Unterpackung Gr. XL	-
PZN Unterpackung Gr. XXL	-
PZN Unterpackung Gr. XXXL	-
Maße & Größe	
Länge	265 mm
Breite	125 mm
Höhe	70 mm
Gewichte zzgl. Toleranzen	
Größe	Bruttogewicht*
XS	560 g
S	610 g
M	660 g
L	710 g
XL	760 g
XXL	810 g
XXXL	860 g

LOGISTISCHE DATEN PALETTE	
Allgemeines	
Palettenart	Europalette
Maße & Größe	
Kartons pro Lage	8
Lagen pro Palette	6
Palettenhöhe	180 cm
Gewichte	
Größe	Bruttogewicht*
XS	318 kg
S	342 kg
M	366 kg
L	390 kg
XL	414 kg
XXL	438 kg
XXXL	462 kg

LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG	
Allgemeines	
Material	Karton
Unterpackungen je Umverpackung	10
GTIN Umverpackung Gr. XS	-
GTIN Umverpackung Gr. S	4044941737355
GTIN Umverpackung Gr. M	4044941737379
GTIN Umverpackung Gr. L	4044941737393
GTIN Umverpackung Gr. XL	4044941737423
GTIN Umverpackung Gr. XXL	4044941737447
GTIN Umverpackung Gr. XXXL	4044941736686
PZN Umverpackung Gr. XS	-
PZN Umverpackung Gr. S	-
PZN Umverpackung Gr. M	-
PZN Umverpackung Gr. L	-
PZN Umverpackung Gr. XL	-
PZN Umverpackung Gr. XXL	-
PZN Umverpackung Gr. XXXL	-
Maße & Größe	
Länge	365 mm
Breite	260 mm
Höhe	275 mm
Gewichte zzgl. Toleranzen	
Größe	Bruttogewicht*
XS	6.100 g
S	6.600 g
M	7.100 g
L	7.600 g
XL	8.100 g
XXL	8.600 g
XXXL	9.100 g

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **01196**

Bezeichnung **MED-COMFORT HIGH RISK**
Nitril-Untersuchungshandschuh
blau, nicht steril, puderfrei



WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lagerung/ Verfallzeit	Handschuhe in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (Laserdrucker, -kopierer) lagern. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen. Das Verfallsdatum – gültig bei ordnungsgemäßer Lagerung – befindet sich auf der Verpackung.
Nutzung und Überprüfung	Schutzhandschuhe immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich und in der richtigen Größe verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von Temperatur, Abrieb und Degradation von denen der Typprüfung abweichen können. Die Angabe der Durchbruchzeiten und Permeationslevel beruhen auf Labormessungen und werden anhand von Proben aus der Handinnenfläche ermittelt. Die tatsächliche Schutzdauer eines Handschuhs bei einer bestimmten Substanz kann durch die Einsatzbedingungen (Temperatur, Abrieb, Dehnung) signifikant abweichen. Bei aggressiven Chemikalien kann die Degradation (Veränderung der mechanischen Eigenschaften) ein wichtiger Faktor sein, der bei der Auswahl von chemikalienbeständigen Handschuhe zu berücksichtigen ist. Diese Angaben spiegeln nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz und die Unterscheidung zwischen Gemischen und reinen Chemikalien wider. Die Chemikalienbeständigkeit wurde unter Laborbedingungen nur anhand von Proben aus der Handfläche bestimmt und bezieht sich nur auf die getesteten Chemikalien. Anders kann es sein, wenn die Chemikalie in einer Mischung verwendet wird. Der Eindringwiderstand wurde unter Laborbedingungen bewertet und bezieht sich nur auf den geprüften Probekörper. Die Abbauergebnisse nach EN ISO 374-4 zeigen die Veränderung der Durchstoßfestigkeit der Handschuhe nach Exposition gegenüber der geprüften Chemikalie. Vor dem Gebrauch sind die Handschuhe auf Löcher oder Beschädigungen zu überprüfen.
Entsorgung	Gebrauchte Handschuhe sind nach Kontakt mit Chemikalien entsprechend der Entsorgungsvorschriften für die Chemikalie sowie entsprechend den Vorschriften des örtlichen Entsorgers zu entsorgen. Unbenutzte Handschuhe können mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Desinfektion	Eine Desinfektion ist für diese Handschuhe nicht vorgesehen und erfolgt in eigener Verantwortung.
Warnhinweise	Schutzhandschuhe sind nur für die einmalige Verwendung bestimmt.
An- und Ausziehanleitung	

*geringe Abweichungen aufgrund von Standard-Toleranzen möglich

Rev.-Nr.: 2026-01
Datum 24.09.2026

Änderungen & Irrtümer vorbehalten