

Ficha Técnica

Artículo No.: **09820**
Descripción: **MED-COMFORT**
torniquete venoso
Envasado individualmente



DIMENSIONES				
longitud	anchura	altura	diámetro	capacidad
450 mm	25 mm	-	-	-

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO							
material	☐ Polipropileno (PP)	☐ Polietileno (PE)	☐ Vellón PP	☐ Vellón de PP con revestimiento de PE	☐ papel	☒ Clip: ABS Band: banda elástica sin látex	
color	☒ azul [B]	☐ cedro [C]	☐ azul oscuro [DB]	☒ verde [G]	☐ verde opaco [GO]	☐ lila [L]	☐ azul claro [LB]
	☐ cal [LIME]	☐ Mix [MIX] negro, cedro, lila, rosa claro, azul claro	☐ naranja [O]	☐ rosa [P]	☒ rojo [R]	☐ rosa claro [ROSE]	☐ negro [SCH]
	☐ violeta [V]	☒ blanco [W]	☐ rojo vino [WR]	☒ amarillo [Y]	☐ plata	☐ natural	☐ bordeaux
característica	☐ de un solo uso	☐ de un solo filo	☐ de 5 capas	☐ sin pelusa	☐ de 6 capas	☒ elástico	
ingredientes	☐ 50% Urea (CAS 57-13-6)	☐ 50% agua	☐ 70 % alcohol isopropílico				
observación							

REQUISITOS DE REGULACIÓN							
EPI Reglamento (EU) 2016/425	☐ categoría I	☐ categoría II	☐ categoría III	☒ no PPE-artículo			CE
#BEZUG!	☒ clase I	☐ clase II	☐ clase III	☐ estéril	☐ con función de edición	☐ no es dispositivo médico	
Contacto con alimentos (EG) 1935/2004	☐ alimentos ácidos	☐ alimentos acuosos	☐ alimentos grasos	☐ alimentos con alcohol	☐ alimentos secos	☒ no contacto con productos alimenticios	

Ficha Técnica

Artículo No.: **09820**
Descripción: **MED-COMFORT**
torniquete venoso
Envasado individualmente



DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE	
información general	
material	cartón/PVC
piezas por subembalaje	1
GTIN subembalaje azul [B]	4044941016245
GTIN subembalaje azul cedro [C]	-
GTIN subembalaje azul oscuro [DB]	-
GTIN subembalaje verde [G]	4044941010359
GTIN subembalaje verde opaco [GO]	-
GTIN subembalaje lila [L]	-
GTIN subembalaje azul claro [LB]	-
GTIN subembalaje cal [LIME]	-
GTIN subembalaje mix [MIX]	-
GTIN subembalaje naranja [O]	4044941727196
GTIN subembalaje rosa [P]	-
GTIN subembalaje rojo [R]	4044941010335
GTIN subembalaje rosa claro [ROSE]	-
GTIN subembalaje negro [SCH]	-
GTIN subembalaje violeta [V]	-
GTIN subembalaje blanco [W]	-
GTIN subembalaje rojo vino [WR]	-
GTIN subembalaje amarillo [Y]	4044941016269
GTIN subembalaje plata	-
GTIN subembalaje natural	-
GTIN subembalaje	-
medidas y tamaños	
largo	42 mm
ancho	40 mm
alto	85 mm
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	36 g

DATOS LOGISTICOS DEL PALET	
general	
tipo de palet	europalet
medidas y tamaños	
cartones por posición	4
posiciones por palet	4
altura del palet	184 cm
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	263 kg

DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR	
información general	
material	cartón
subembalajes por embalaje exterior	400
GTIN embalaje exterior azul [B]	4044941016252
GTIN embalaje exterior cedro [C]	-
GTIN embalaje exterior azul oscuro [DB]	-
GTIN embalaje exterior verde [G]	4044941010366
GTIN embalaje exterior verde opaco [GO]	-
GTIN embalaje exterior lila [L]	-
GTIN embalaje exterior azul claro [LB]	-
GTIN embalaje exterior cal [LIME]	-
GTIN embalaje exterior mix [MIX]	-
GTIN embalaje exterior naranja [O]	4044941727202
GTIN embalaje exterior rosa [P]	-
GTIN embalaje exterior rojo [R]	4044941010342
GTIN embalaje exterior rosa claro [ROSE]	-
GTIN embalaje exterior negro [SCH]	-
GTIN embalaje exterior violeta [V]	-
GTIN embalaje exterior blanco [W]	-
GTIN embalaje exterior rojo vino [WR]	-
GTIN embalaje exterior amarillo [Y]	4044941016276
GTIN embalaje exterior plata	-
GTIN embalaje exterior natural	-
GTIN embalaje exterior	-
medidas y tamaños	
largo	453 mm
ancho	380 mm
alto	423 mm
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	14.900 g

Ficha Técnica

Artículo No.: **09820**
Descripción: **MED-COMFORT**
torniquete venoso
Envasado individualmente



ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Almacenamiento	Almacenar los artículos en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, proteger de la luz solar directa.
Uso e inspección	1. Abra el embalaje y extraiga el torniquete. Despléguelo de forma que la parte delantera del cierre señale hacia arriba. Coloque la cinta elástica alrededor de la zona a comprimir o alrededor de la zona del codo. 2. Inserte el cierre en la contrapieza de inserción y fíjela. 3. Tire de la cinta elástica hasta que se asiente lo suficientemente tensada. 4. Para soltar el torniquete pulse en primer lugar en la parte delantera del cierre, para soltar la cinta. Después, presione sobre el botón en la parte delantera. La contrapieza de inserción libera automáticamente el cierre.
Instrucciones de limpieza	Si no está muy sucio, es posible lavarlo a mano hasta una temperatura máxima de 60 °C con detergente doméstico normal. Se recomienda una desinfección con desinfectante líquido. No apropiado para procesos de desinfección físicos.
Eliminación	El producto debe eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos. Los productos no utilizados pueden eliminarse con la basura doméstica. No tirar al inodoro.
Advertencias / información de seguridad	Utilizar sólo por personal médico formado. El uso inadecuado puede provocar lesiones o complicaciones.

Nº de rev.: 2025-01
fecha: 09. 09.2025

*ligeras desviaciones posibles debido a tolerancias estándar

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas